

# ІНСТРУКЦІЯ по застосуванню

## Атомер гіпертонічний спрей 100 мл

**Склад засобу:** стерильна гіпертонічна морська вода, що містить 2,5 % натрію хлориду.

### **Атомер гіпертонічний застосовують:**

- для розрідження та виведення виділень, загального очищення носових порожнин;
- зменшення набряку та закладеності носа.

### **Атомер гіпертонічний рекомендований:**

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, додаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, гіпертрофічних ринітах;
- при гайморитах, фронтитах, ейтмоїдитах;
- при ринітах вагітних;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціювання повітря.

**Спосіб застосування.** Атомер гіпертонічний обладнаний спеціальним розпилювачем, який обертається горизонтально та вертикально, що полегшує вприскування в будь-якому положенні та забезпечує глибоке та м'яке зрошення слизової оболонки носа. Об'єм розпилювання контролюється автоматично.



Розмістити розпилювач в носовий прохід та легко натиснути на його край. Рекомендовано робити від 1 до 3 вприскувань в кожную ніздрю до 3 разів на день.

**Застереження.** Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. З метою гігієни промивати розпилювач після кожного використання.

**Протипоказання.** Алергія на компоненти препарату.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°C в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

### **Переваги Атомер гіпертонічний:**

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- гіпертонічний розчин забезпечує зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та видаленню надлишкової рідини завдяки різниці осмотичного тиску;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

**Виробник:**

**PHARMACOSMETIC-DIAFARM G.SOULTOGIANNIS & CO. E.E.,**

Ypsilanti str., Settelment Paralimni

570 01 Themi Thessaloniki, Greece

тел.: +30 2310 486 320; +30 2310 486 321

факс: +30 2310 486 322

e-mail: bioplant@otenet.gr

**Представник в Україні:**

**ТОВ «МІТЕК»**

03057, Київ, вул. Металістів, 16

тел./факс: +38 044 495 29 29

e-mail: mitek@mitek.kiev.ua